

Link do produktu: <https://pentagon.pl/przyrzad-do-bezpiecznego-usuwania-kleszczy-kick-the-tick-p-12231.html>

Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick



Cena	10,90 zł
Numer katalogowy	547-001
Kod producenta	KTT-PRZY
Kod EAN	5904215273578
Typ materiału	tworzywo sztuczne
Producent	Kick The Tick, Polska
Marka	Kick The Tick

Opis produktu

Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick to ważny dodatek do każdej domowej lub osobistej apteczki, pozwalający na szybkie i prawidłowe usunięcie ze skóry pasożyta, który stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Bezpiecznie i łatwo

Kick the Tick to specjalnie opracowane narzędzie, dopasowane do budowy kleszcza, służące do samodzielnego i bezpiecznego usunięcia ze skóry tego niebezpiecznego pajęczaka.

Prawidłowe użycie przyrządu Kick the Tick minimalizuje ryzyko transmisji niebezpiecznych dla zdrowia czynników, które może wydzielać kleszcz w trakcie siłowej ekstrakcji.

Przyrząd do usuwania kleszczy Kick The Tick – lekka konstrukcja

Narzędzie zaprojektowano w taki sposób, by **pozwalalo na usunięcie kleszczy o wielkości od 0,8 do 5 mm**. Służą do tego 2 końcówki o różnym rozmiarze, umożliwiające **bezpieczne pozbycie się larw, nimf oraz dorosłych osobników**.

Kick the Tick wykonano z lekkiego tworzywa, dlatego może być stale przenoszone przy w kieszeni, portfelu lub apteczce. Środkowa część narzędzia ma ryflowanie, zapobiegające ześlizgiwaniu się palców podczas delikatnej operacji.

Przyrząd **pozwała na usuwanie kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt**.

Użytkowanie

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej końcówki przyrząd należy docisnąć do skóry, wsunąć „pod kleszcza” w taki sposób by znalazł się w szczelinie końcówki. Następnie zdecydowanym ruchem wyciągamy kleszcza, unosząc przyrząd do góry.

Po usunięciu należy sprawdzić, czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty kleszcza. Po zdezynfekowaniu rany utylizujemy kleszcza lub dostarczamy go w próbkówce do analizy laboratoryjnej. Po każdym użytkowaniu przyrząd i ręce należy umyć lub zdezynfekować.

Przyrząd do usuwania kleszczy Kick The Tick – cechy

- Umożliwia łatwe i bezpieczne usunięcie kleszcza;
- ergonomiczny kształt;
- zastosowane materiały umożliwiają precyzyjny zabieg;
- końcówki zaprojektowane z myślą o różnych rozmiarach kleszcza;
- wyrób medyczny.

