

Link do produktu: <https://pentagon.pl/zestaw-do-bezpiecznego-usuwania-kleszczy-kick-the-tick-9-ml-p-14627.html>



## Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick 9 ml

Cena	<b>41,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>547-000</b>
Kod producenta	<b>KTT-SPRAY-9ML-02-ZES</b>
Kod EAN	<b>5904215273561</b>
Sposób rozprowadzania	<b>spray</b>
Ochrona przed	<b>kleszcze</b>
Producent	<b>Kick The Tick, Polska</b>
Marka	<b>Kick The Tick</b>

### Opis produktu

**Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick 9 ml składa się z przyrządu do usuwania kleszczy oraz specjalistycznego preparatu, który zamraża i blokuje wydzielanie skażonej śliny pajęczaka.**

### Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick, czyli zamroź kleszcza

Stosowanie **preparat Kick the Kick** podczas usuwania kleszczy znacząco **obniża ryzyko zarażenia chorobami odkleszczowymi** m.in.:

- kleszczowym zapaleniem mózgu,
- boreliozą,
- babeszjoza,
- anaplazmozą.

Środek **umożliwia zamrożenie kleszcza przed usunięciem** i zablokowanie w ten sposób wydzielania toksycznej śliny zawierającej groźne bakterie i wirusy. Dzięki wykorzystaniu technologii APRF (Anti-Parasite Removal Film) preparat tworzy na ciele kleszcza mocną powłokę zapobiegającą zgnieceniu lub rozerwaniu korpusu podczas usuwania.

Preparat zamrażający może być aplikowany pod dowolnym kątem. Środek nie wywołuje oparzeń i reakcji alergicznych, **może być stosowany u dzieci od 3 lat**. Zawarty w opakowaniu środek wystarcza na usunięcie ok. 40 kleszczy.

### Narzędzie do bezpiecznego usuwania kleszczy

Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy **Kick The Tick to ważny dodatek do każdej domowej lub osobistej apteczki**, pozwalający na **szybkie i prawidłowe usunięcie ze skóry pasożyta**, który stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

### Bezpiecznie i szybko

Kick the Tick to specjalnie opracowane narzędzie, **dopasowane do budowy kleszcza**, służące do samodzielnego i bezpiecznego usunięcia ze skóry tego niebezpiecznego pajęczaka.

Prawidłowe użycie przyrządu **Kick the Tick minimalizuje ryzyko transmisji niebezpiecznych dla zdrowia czynników**, które może wydzielać kleszcz w trakcie siłowej ekstrakcji.

### Lekka konstrukcja

Narzędzie zaprojektowano w taki sposób, by **pozwalalo na usunięcie kleszczy o wielkości od 0,8 do 5 mm**. Służą do

---

tego **2 końcówki o różnym rozmiarze**, umożliwiające bezpieczne pozbycie się larw, nimf oraz dorosłych osobników.

Kick the Tick wykonano z lekkiego tworzywa, dlatego może być stale przenoszone przy w kieszeni, portfelu lub apteczce. Środkowa część narzędzia ma ryflowanie, zapobiegające ześlizgiwaniu się palców podczas delikatnej operacji.

Przyrząd pozwala na usuwanie kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt.

## **Użytkowanie**

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej końcówki przyrząd należy docisnąć do skóry, wsunąć „pod kleszcza” w taki sposób by znalazł się w szczelinie końcówki. Następnie zdecydowanym ruchem wyciągamy kleszcza, unosząc przyrząd do góry.

Po usunięciu należy sprawdzić, czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty kleszcza. Po zdezynfekowaniu rany utylizujemy kleszcza lub dostarczamy go w próbkówce do analizy laboratoryjnej. Po każdym użytkowaniu przyrząd i ręce należy umyć lub zdezynfekować.

## **Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick – cechy**

- Środek umożliwia samodzielne, szybkie i bezpieczne usunięcie kleszcza;
- ogranicza ryzyko zakażenia podczas zabiegu;
- aplikator działa pod każdym kątem, co daje możliwość zamrażanie kleszczy nawet w trudno dostępnych miejscach;
- nie zawiera środków owadobójczych;
- wystarcza na usunięcia ok. 40 kleszczy;
- może być stosowany u dzieci już od 3. roku życia.